

RECOMENDADO:

MELAG**Servicio Técnico MELAG**

Cuenta con 12 puntos de asistencia para dar cobertura en todo el territorio nacional en un plazo de 24/48 horas.

SELECCIÓN

sólo **2.875,00**

MELAG

MELAtronic® 23 EN

Con el desarrollo de los nuevos autoclaves MELAtronic 23EN, Melag ofrece ahora también en el campo de autoclaves estándar equipos conforme a las normativas, con una calidad y fiabilidad demostrada. Cumplen todas las exigencias de la nueva Norma Europea EN 13060 para autoclaves "Clase N". Los autoclaves MELAtronic EN trabajan bajo el procedimiento de flujo fraccionado, controlado por microprocesador para el registro y supervisión de los parámetros de esterilización, presión, temperatura y tiempo, reduciendo rápidamente el aire restante, consiguiendo eficazmente vapor saturado.

Ofrecen cuatro programas para la esterilización:

Programa universal "S" y Programa de Priones "S" (ambos a 134°C) se puede esterilizar instrumentos masivos embolsados.

Programa rápido "N" (134°C) se pueden esterilizar instrumental sin embolsar obteniéndolos tras 17-21 minutos sin secado.

Programa delicado "N" (121°C) puede esterilizarse material delicado sin embolsar o instrumental masivo embolsado que necesite de una larga esterilización.

Sistema cerrado de agua: el agua utilizada y a su vez ensuciada vuelve a ser reutilizada.

Por medido de un medidor de calidad de agua, detecta el deterioro de la calidad del agua.

En caso de no ser cambiada el agua no se podrá arrancar el equipo.

Activando la función de precalentamiento, la cámara de esterilización se calienta a una temperatura determinada, de esta manera se reduce la condensación y el consumo de agua.

Si tras terminado el proceso de esterilización, abrimos un poco la puerta, con la temperatura de la cámara obtendremos un secado óptimo.

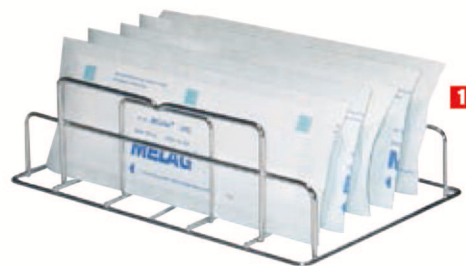
La cámara de esterilización y los depósitos son de acero inoxidable de alta calidad.

El resto de piezas que conducen el vapor son de materiales inoxidables.

Datos técnicos:

- Medidas exteriores: 59 x 52 x 38 cm
- Medidas de la cámara: 23 cm diámetro x 45 cm
- Capacidad: 19 litros
- Medida de las bandejas: 42 x 19 x 2 cm
- Carga máxima: 4 kg de instrumentos masivos.

Unidad **907-1251** **2.875,00**

**Accesorios****Bandeja autoclave Melag tipo 23/24**

Medidas: 42 x 19 x 2 cm

Unidad **904-4521** **44,95**

1 Soporte para bolsas en vertical

Unidad **907-7002** **79,95**