

RECOMENDADO:

MELAG



**SELECCIÓN**  
sólo **3.595,00**

MELAG

**Euroklav® 23V-S con pre y post vacío**

Autoclave "clase S", con cuadro de control electrónico de alta tecnología. Un moderno microprocesador controla los parámetros de presión, temperatura y tiempo durante el ciclo de esterilización.

**Prevacío y sistema de gravedad fraccionado:**

Siguiendo el estándar europeo prEN13060, como autoclave "clase S", el aparato debe vaciar de forma efectiva el aire de la cámara antes de comenzar el ciclo. Como resultado de la repetida evacuación de aire alternándola con emisión periódica de vapor, el Euroklav® 23 V-S cumple estrictamente con este requerimiento para la calidad del vapor.

**Exactitud de la temperatura por control electrónico:**

Para asegurar una esterilización perfecta tiene 2 sensores de temperatura redundantes y un sensor de precisión para la presión. Durante el programa, el procesador captura los datos de presión, temperatura y tiempo. El autoclave monitoriza estos valores y los graba como documentación.

**Innovador sistema de suministro de agua:**


Los autoclaves estándar funcionan exclusivamente sobre la base de sistemas de recirculación de agua, que reutilizan continuamente el agua. Después de haber sido utilizada un vez, el agua está sucia. El Euroklav® 23 V-S trabaja bajo el principio de "agua no reutilizable".

Este sistema es considerablemente más cuidadoso con los instrumentos y con el propio autoclave. Asimismo, reduce considerablemente el esfuerzo de limpiar el autoclave ahorrando tiempo y dinero.


**Programas:**

4 programas de esterilización y 2 programas de test (test de vacío y test de Bowie&Dick). Después de presionar el botón "start", el programa seleccionado se ejecuta automáticamente.

Programas	Rápido	Universal	Suave	Priones
Temperatura de esterilización	134°C	134°C	121°C	134°C
Presión de esterilización	2.1. bares	2.1. bares	1.1. bares	2.1.bares
Tiempo de calentamiento para 0,5 kg de instrumentos	12,5 minutos	20 minutos	32 minutos	37 minutos
Tiempo de calentamiento para 3-4 kg de instrumentos	15 minutos	22 minutos	35 minutos	39 minutos
Tiempo de secado	12-15 minutos	22-26 minutos	27-30 minutos	22-25 minutos

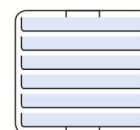

**Soporte "C"**  
para 6 bandejas

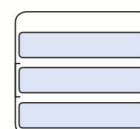

**Soporte "C"**  
para 3 cassetes



**Soporte "B"**  
para 4 cassetes  
o 4 bandejas

**Datos técnicos:**

- Medidas interiores: 25 cm de diámetro x 45 cm
- Medidas exteriores: 66 x 42,5 x 48,5 cm
- Capacidad: 22 litros.
- Potencia: 3000 W
- Peso: 43 kg
- Capacidad para 5 bandejas.
- Incluye soporte para 5 bandejas o 3 cassetes.


Unidad **907-1252** **3.595,00**

**Accesorios**

**Bandeja autoclave Melag tipo 23/24**

Medidas: 42 x 19 x 2 cm

Unidad **904-4521** **44,95**

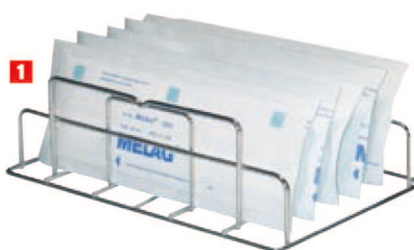

**Soporte para bolsas en vertical**

Unidad **907-7002** **79,95**